



救急絆創膏

ウレタン素材で水に強い



ピッタリフィットのわん曲形状



きずパットフィットN

カルタイプ

第3類医薬品

ウレタン素材使用



1サイズ24枚入

- 水に強い
- むれない
- のび～る



ウレタン素材で水に強い



使用期限

製造番号

ウレタン素材使用

カルタイプ
救急絆創膏

1サイズ24枚入

この外箱は製品とともに保管し、使用の際には必ずお読みください。

殺菌消毒薬 販売名:きずパットフィットN 第3類医薬品

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能又は効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
 - (4) 粘着面に患部に貼らないでください。
 - (5) 貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
 - (6) コードチンキと同時に使用しないでください(アクリノールの殺菌力を弱めます)。
 - (7) 皮膚の弱い人は絆創膏部分を同じ所に続けて貼らないでください。
- 成分及び分量 アクリノール水和物 0.8g
添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼを含有します。
- (保管及び取扱上の注意)
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

紙箱

外装フィルム

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製品販売元



大協薬品工業株式会社

富山県市水橋南173

内容 19mm×70mm

24枚入

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)



T13

TA20-11T



1

0000-2399

一本刃